

NYCOCARD® CE





Nycocard está estandarizado de acuerdo con las recomendaciones del ERL, European Referente Laboratory, en DCCT niveles y certificado de acuerdo con el ERL Check Up Protocol, Así mismo tiene la certificación NGSP de EE, UU en el programa Nacional de estandarización para la Hemoglobina Glucosilada.

Precisión con coeficientes de variación menores del 5% y correlaciones de $r=0,994$ con sistema HPLC (Mono S) y de $r=0,973$ con el VARIANT (Biorad)



CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION
231-002	Nycocard® HbA1c,	24 tests
231-013	Nycocard® HbA1c Control,	2 x 1,5 mL
231-003	Nycocard® μ -Albumina	24 tests
231-014	Nycocard® μ -Albumina Control	2 x 1,0 mL
231-007	Nycocard® PCR	48 tests
028-001	Nycocard® DIMERO-D Single Test	24 tests
231-001	Nycocard® READER II	Instrumento
231-004	Pipetas Mini-Pet 25 uL	1 unidad
231-012	Pipetas Mini-Pet 50 UI	1 unidad
231-008	Pipetas Mini-Pet 5 uL	1 unidad
1029255	Pipetas Mini-Pet 20 UI	1 unidad
231-005	Tubos capilares 5 UI	1 x 200
231-011	PINZA SUJECCIÓN ROJA	1 unidad

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
			
Añadir 5 μ L de sangre en el tubo del test, mezclar bien e incubar durante 2 min.	Mezclar de nuevo y añadir 25 μ L de la mezcla de reacción en el dispositivo.	Añadir 25 μ L de solución de lavado, Esperar tres minutos.	Lea el resultado antes de 5 min, Usando Nycocard® Reader II.

CARACTERÍSTICAS

- Rango de medida : 3-18% HbA1c
- Valores de Referencia : 4,5-6,3% HbA1c
- Volumen de muestra : 5 μ L de sangre total.
- Tiempo de espera para la lectura de resultado : 3 minutos.
- Precisión : Coeficiente de variación menor de 5%
- No tiene interferencia de variantes de Hemoglobina o derivados^{7,8,9}.

MICROALBUMINURIA

179-007	MICRAL TEST II	30 TIRAS
---------	----------------	----------