

NYCOCARD®



NYCOCARD®

Código	Producto	Presentación
<b>NYCOCARD®</b>		
<p>Nycocard está estandarizado de acuerdo con las recomendaciones del ERL, European Referente Laboratory, en DCCT niveles y certificado de acuerdo con el ERL Check Up Protocol, Así mismo tiene la certificación NGSP de EE, UU en el programa Nacional de estandarización para la Hemoglobina Glucosilada. Precisión con coeficientes de variación menores del 5% y correlaciones de r=0,994 con sistema HPLC (Mono S) y de r=0,973 con el VARIANT (Biorad).</p>		
231-001	NycoCard® Reader II	Instrumento
231-002	NycoCard® HbA1c,	24 tests
231-013	NycoCard® HbA1c Control,	2 x 1,5 mL
231-003	NycoCard® µ-Albumina	24 tests
231-014	NycoCard® µ-Albumina Control	2 x 1,0 mL
231-007	NycoCard® PCR	48 tests
028-001	NycoCard® DIMERO-D Single Test	24 tests

CARACTERÍSTICAS NYCOCARD®

- Rango de medida
- Valores de Referencia
- Volumen de muestra
- Tiempo de espera para la lectura de resultado
- Precisión
- No tiene interferencia de variantes de Hemoglobina o derivados <sup>7,8,9</sup>

**3-18% HbA1c**  
**4,5-6,3% HbA1c**  
**5µL de sangre total.**  
**3 minutos.**  
**Coefficiente de variación menor de 5%**

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO



Añadir 5µL de sangre en el tubo del test, mezclar bien e incubar durante 2 min.



Mezclar de nuevo y añadir 25µL de la mezcla de reacción en el dispositivo.



Añadir 25µL de solución de lavado. Esperar tres minutos.



Lea el resultado antes de 5 min, usando Nycocard® Reader II.

