

DIAMONDIAL

Staph Plus Kit

NUEVO

Nuevo látex de cuarta generación para identificación de *Estafilococo aureus*

IgG específicas para los antígenos capsulares 5 y 8



DIAMONDIAL Staph Plus Kit

- Identificación *Staphylococcus aureus* incluyendo MRSA.
- Detecta Coagulasa, Proteína A y Antígenos capsulares 5 y 8.
- Micropartículas carboxiladas de 950nm.
- Alto rendimiento: Sensibilidad >99,9% y Especificidad >99,9%.
- Resultados en 20 segundos.
- Control negativo.


Protocolo



1 Aplicar una gota del Reactivo de látex en círculos separados de la tarjeta.



2 Transferir dos colonias y mexclar con el Reactivo de látex.

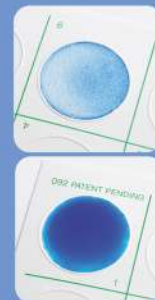

3 Balancear la tarjeta y observar la aglutinación en 20 segundos

Código

Descripción

Presentación

571DML-1100

Staph Plus Kit

100 Tests

571DML-1130

Staph Plus Kit

300 Tests

571DML-1101

Staph Plus Latex Reagent

5 ml

571DML-1102

Staph Plus Negative Control

2,5 ml

SANILABO S.L.

C/San Roque 30, bajo. 46910. Benetusser (Valencia)

☎ 902 100 275 / 963 950 809 📠 902 100 274 / 963 740 484

www.sanilabo.com
Página web

www.sanilaboshop.es
Tienda online

Síguenos en:



ER-0263/2015