

DIAMONDIAL Strep Kit

Nuevo látex carboxilado para
grupaje de Streptococos

RESULTADO EN 2 MINUTOS

GRUPO D INCLUIDO

Nueva extracción instantánea.

Identificación de los grupos A, B, C, F, G y D.


Fácil lectura (partículas carboxiladas de 950 nm).

Proceso completo a temperatura ambiente.

Reactivos listos para su uso y codificados por color.

Nueva tarjeta con bordes de las secciones en relieve.

Reactivos disponibles en formato kit o por separado.

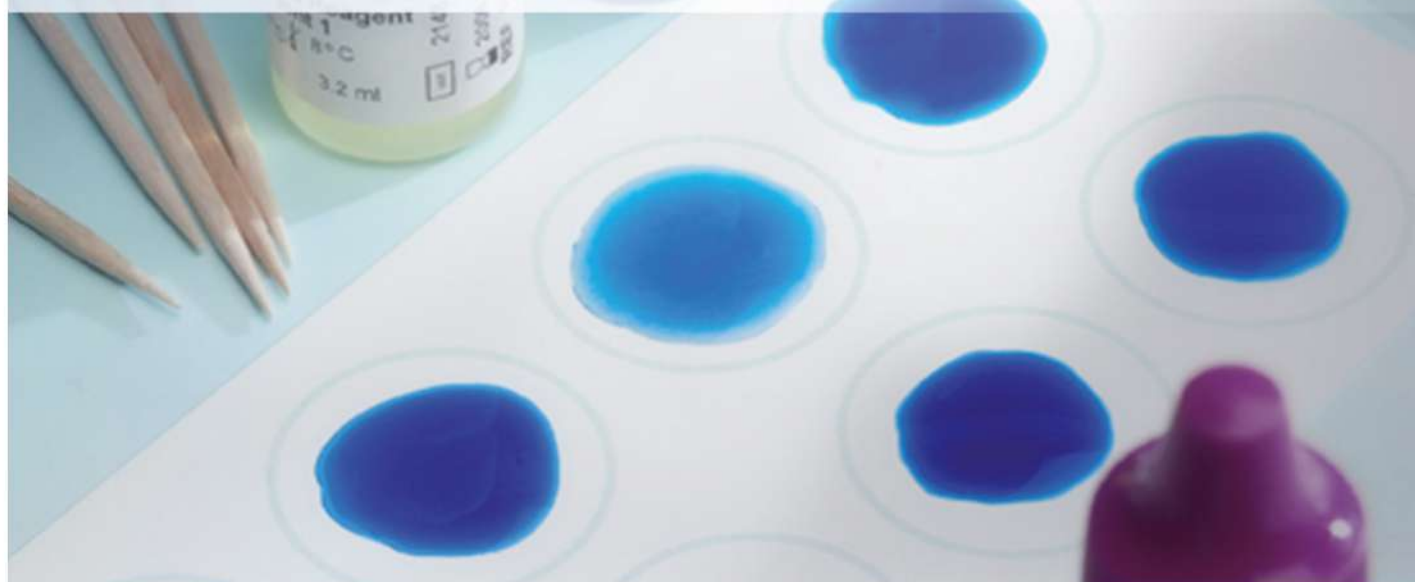


DIAMONDIAL Strep Kit



1 Aplicar una gota del Reactivo 1 a cada tubo



2 Seleccionar de 1 a 4 colonias

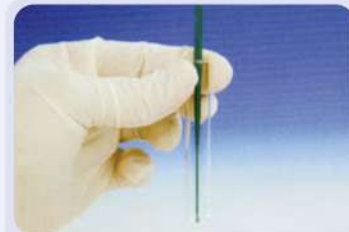

3 Suspender las colonias en el tubo con el Reactivo 1 y mezclar



4 Añadir 1 gota del Reactivo 2 a cada tubo y mezclar



5 Añadir 5 gotas del Reactivo 3 a cada tubo y mezclar.



6 Dispensar 1 gota de la suspensión de látex y 1 gota de la muestra tratada en cada sección de la tarjeta.



7 Mezclar las gotas, rotar la tarjeta y observar la aglutinación.

Código	Descripción	Presentación
571DML-1001	Diamondial Strept Kit	6 x 60 tests
571DML-1002	Strep Latex Group A (3 ml)	60 tests
571DML-1003	Strep Latex Group B (3 ml)	60 tests
571DML-1004	Strep Latex Group C (3 ml)	60 tests
571DML-1005	Strep Latex Group D (3 ml)	60 tests
571DML-1006	Strep Latex Group F (3 ml)	60 tests
571DML-1007	Strep Latex Group G (3 ml)	60 tests
571DML-1008	Strep Extraction 1 (3,2ml)	60 tests
571DML-1009	Strep Extraction 2 (3,2ml)	60 tests
571DML-1010	Strep Extraction 3 (2X8ml)	60 tests
571DML-1011	Strep Control (2ml)	60 tests
571DML-1012	Mixing Sticks	60 tests
571DML-1013	Agglutination Cards	60 tests
571DML-1014	Strepto Extraction Kit	160 tests

SANILABO S.L.

C/San Roque 30, bajo. 46910. Benetusser (Valencia)

☎ 902 100 275 / 963 950 809 📠 902 100 274 / 963 740 484

www.sanilabo.com
Página web

www.sanilaboshop.es
Tienda online

Síguenos en:



ER-0263/2015