

# BiopSafe

PRESS FOR BETTER SAFETY



**SANILABO S.L.**

C/San Roque 30, bajo. 46910. Benetusser (Valencia)

☎ 902 100 275 / 963 950 809 ☎ 902 100 274 / 963 740 484

[www.sanilabo.com](http://www.sanilabo.com)  
Página web

[www.sanilaboshop.com](http://www.sanilaboshop.com)  
Tienda online

Síguenos en:



## **EL NUEVO CAMINO PARA LA MANIPULACION SEGURA DE LAS BIOPSIAS**


A veces la solución sencilla es la más difícil de conseguir. Uno de los problemas más comunes en relación a la manipulación de las biopsias es el riesgo de estar expuesto a la formalina, bien sea por contacto, bien sea por inhalación. Un riesgo al que doctores, veterinarios, técnicos de laboratorio y enfermeras están expuestos todos los días. Con Biopsafe el problema está finalmente resuelto.

### **EL SECRETO ESTÁ EN LA TAPA**

Con Biopsafe no hay complicados recipientes de formalina que a menudo causan pérdidas o fugas de esta sustancia. El sistema consta de un pequeño recipiente fácil de usar con formalina encapsulada en la tapa. Cuando la biopsia se deposita en el recipiente, se enrosca la tapa y se presiona con el pulgar, que libera la formalina y cubre la biopsia. Todo este proceso se realiza dentro del recipiente y no puede haber pérdida de formalina ni en forma líquida ni de vapores.



Se desenrosca la tapa.

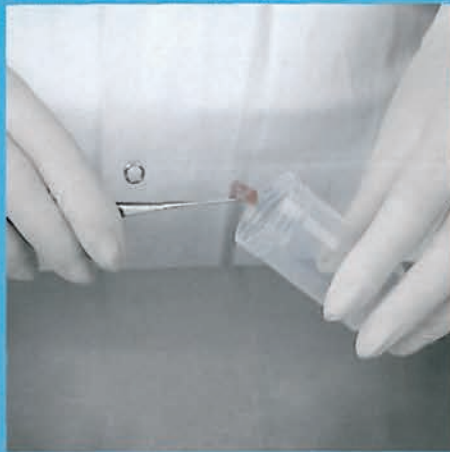


Se introduce la biopsia en el recipiente.



Se enrosca la tapa.



La formalina se libera al presionar la tapa.

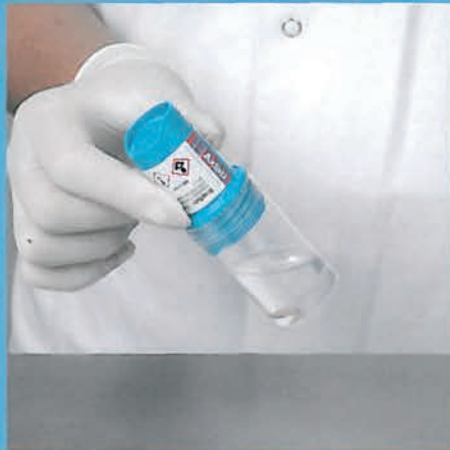

La formalina y la biopsia se mezclan.



La biopsia está lista para su transporte.



### **LISTO EN UN INSTANTE**

Además de ser seguro, el método es también muy rápido. Biopsafe es muy práctico y el proceso de depositar la biopsia y añadir la formalina para su transporte al laboratorio es realizado en segundos. Biopsafe ahorra un tiempo valioso y por su simplicidad. Biopsafe ahorra un valioso tiempo y, a la vez, asegura que la concentración no se rompe innecesariamente durante las operaciones.

### **SISTEMA HERMÉTICAMENTE SELLADO**

Además de provocar la irritación de las membranas mucosas y alergia, la formalina es una sustancia cancerígena. Por consiguiente es muy importante asegurar un entorno laboral seguro al manipular la formalina. Con Biopsafe la manipulación es realizada en un sistema herméticamente sellado proporcionando la mejor protección al personal médico. Ni siquiera en el proceso de enroscar y desenroscar la tapa el personal está expuesto a la formalina sea en forma líquida o con sus vapores.



Biopsafe hace la vida diaria más fácil y segura a doctores, veterinarios, técnicos de laboratorio y enfermeras, tanto cuando trabajan en el hospital, la clínica o donde sea necesario.

# BiopSafe

PRESS FOR BETTER SAFETY

## INNOVANDO EL FUTURO

La única constante en el mundo es el cambio. Axlab Innovation se esfuerza por dirigir el cambio en vez de tan sólo seguirlo. Trabajamos por soluciones que aseguren a nuestros clientes eficiencia en el futuro. Para hacerlo, no sólo disponemos del equipo tecnológico más avanzado, también estamos equipados para el futuro por nuestra iniciativa y filosofía innovadora. Los resultados son ahorro de tiempo, un entorno de trabajo mejor y finalmente pero no por ello menos importante un mejor servicio para usuarios y pacientes ahora y en el futuro.

# BiopSafe