

Estimado cliente,

El test SANILABO COVID-19 Ag es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la **detección cualitativa de antígenos** de nucleoproteínas virales del SARS-CoV-2 en muestras nasofaríngeas y orofaríngeas humanas.

Test rápido antígenos COVID19



Muestra: Muestra orofaríngea o nasofaríngea.

Sensibilidad de diagnóstico: 80,2%

Especificidad de diagnóstico: >99,9%

Contenido de la caja:

- 20 test en casete por caja
- 20 hisopos estériles
- 20 tubos de extracción con tapas cuentagotas
- 2 botes de búfer (de 7 mL cada uno)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Mezcle suavemente el búfer girando cuidadosamente la botella.

2. Sujetando el bote de búfer verticalmente y sin tocar el borde del tubo, añada 10 gotas al tubo de extracción.

3. Inserte el hisopo con la muestra recolectada en el tubo. Gire el hisopo y apriételo 10-15 veces contra la pared del tubo para extraer los antígenos contenidos en el mismo.





4. Deje reposar la solución durante 2 minutos.

5. Retire el hisopo apretándolo firmemente contra el tubo para liberar la mayor cantidad de líquido posible. Elimine el hisopo según las directrices para el tratamiento de agentes infecciosos.

6. Retire el casete de test de su envase de aluminio y utilícelo lo antes posible. Los mejores resultados se obtendrán si el test se realiza inmediatamente después de abrir el envase. Etiquete el casete de test con la identificación del paciente o de control.

7. Coloque el casete sobre una superficie limpia y plana. Ajuste una tapa cuentagotas al tubo de extracción, invierta el tubo y transfiera 2 gotas de la solución extraída al pocillo de muestras (S) del casete de test.

8. Active el cronómetro y espere a que aparezca(n) la(s) línea(s) coloreada(s). Lea el resultado del test después de 15 minutos.

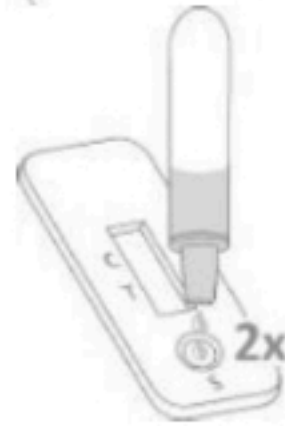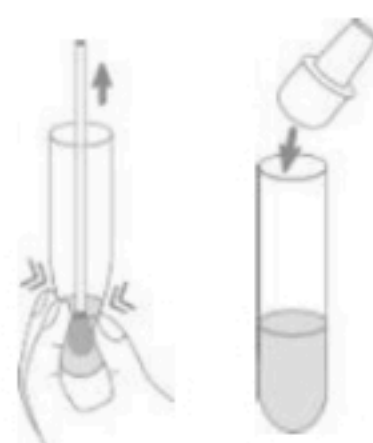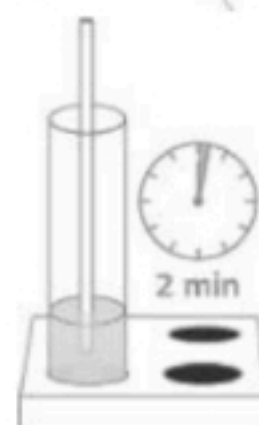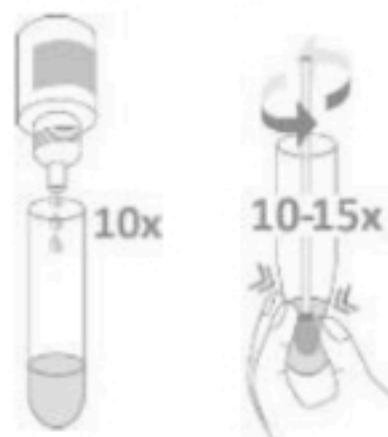

Producto con alta demanda. Le recomendamos que contacte lo antes posible con nosotros para conocer **disponibilidad y precio.**

Para más información contacte con el comercial de su zona o también:

SANILABO S.L.U.

C/San Roque 30, bajo. 46910. Benetusser (Valencia)

☎ 963 950 809

✉ sanilabo@sanilabo.com